


# Introcan Safety<sup>®</sup> 3

## Veilig en efficiënt met bloedcontrole septum

### Tips voor gebruik

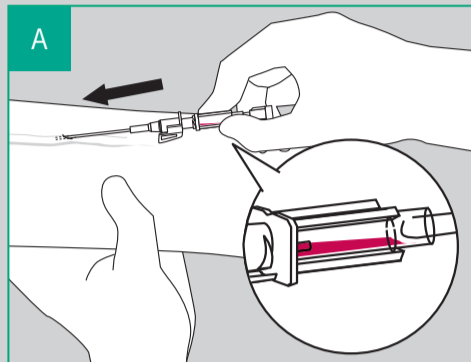


#### Vorbereiding:

- kies een plaats om aan te prikken geschikt voor de klinische toepassing
- kies de juiste maat (Gauge en lengte)
- verwijder de beschermkap met een voorwaartse beweging


#### Aanprikken en observeren:

- trek de huid voorzichtig strak
- prik onder een hoek van max. 35 graden
- observeer de eerste flashback van bloed in de flashbackkamer (A)

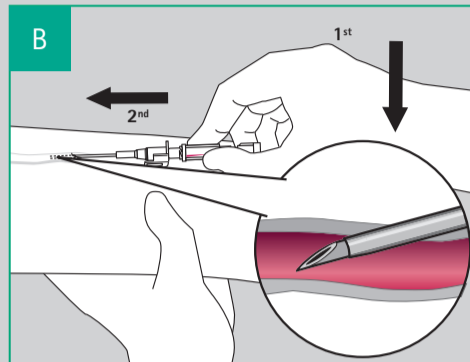


#### Eerste flashback:

- de eerste flashback bevestigt dat de naald in het bloedvat zit
- de aanpriekhoek is niet meer van toepassing (B)

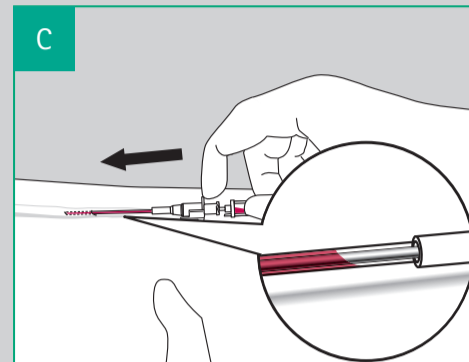


#### Tweede flashback:

- gebruik de gripplaat om de katheter 3 tot 5 mm op te schuiven
- observeer de tweede flashback van bloed, zichtbaar tussen de katheter en de naald (C)
- het zien van de tweede flashback bevestigt dat de katheter in het bloedvat zit
- schuif in een vloeiende beweging de katheter verder op
- maak de stuwband los

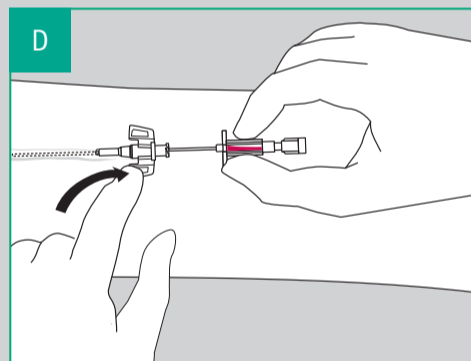


#### Stabiliseren van de katheter:

- druk de vleugels plat voor stabilisatie (D)

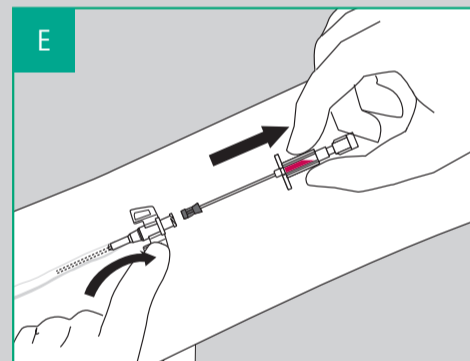

#### Verwijderen van de naald:

- trek in één vloeiende beweging de naald uit de hub (E)
- het veiligheidsmechanisme wordt automatisch geactiveerd
- werp de naald in een naaldcontainer
- het bloedcontrole septum houdt nu flashback van bloed tegen waardoor beide handen vrij zijn voor de volgende handeling

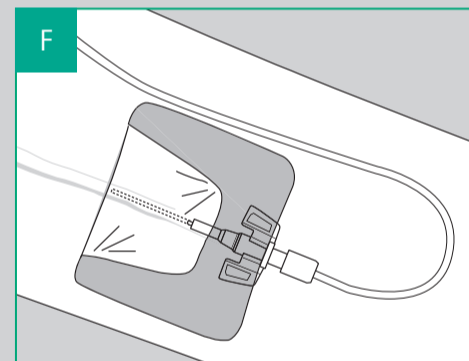

#### Fixeren:

- sluit een toedieningssysteem of afsluitdopje aan op de hub van de intraveneuze katheter
- fixeer eerst de vleugels en plak vervolgens de intraveneuze katheter af met een IV-pleister met een transparant gedeelte waarbij de insteekopening altijd zichtbaar is (F)

