

EZCOVER® - Ultrasound probe cover set

Stop before you block!



1
Open de verpakking en haal de set er uit.



2
Zoek de middelste vouw van de hoes op door te zoeken naar de sticker 'hand here'.




3
Steek je hand in de hoes.



4a
Breng een kleine hoeveelheid steriele gel aan op de hoes (a) en/of probe (b).



5a
Pak de probe (a) op of laat hem aan je overhandigen (b).
Opmerking: "probe here" alleen zichtbaar voor STOP (check) varianten.

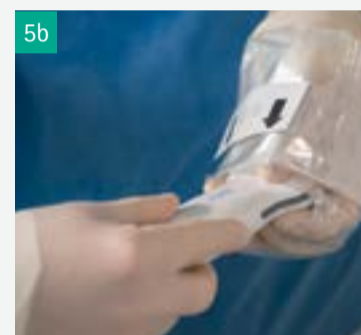

6
Pak de "pull here" sticker vast en trek de hoes over de probe en kabel.



7
Gebruik de elastieken om de hoes op zijn plaats te houden.



8
Voer een time-out uit en verwijder de sticker.
(alleen STOP (check) varianten)



9a
Zorg dat er geen luchtballen onder de hoes zitten, voor duidelijke echobeelden.



De STOP (check) sticker herinnert de behandelaar er direct aan om bij de start van de behandeling te STOPPEN en de time out procedure uit te voeren. EZCOVER® is verkrijgbaar met en zonder STOP (check) sticker.

