






MINI-GUIDE



INFUSOMAT[®] COMPACT^{PLUS} P






MISE EN SERVICE ET DÉBUT DE LA PERFUSION

1. Pour allumer l'appareil : Ouvrez la porte avec le levier ou appuyez sur .
2. Suivez les instructions à l'écran :
 - Ouvrez la pompe en tirant le levier de la porte vers l'avant.
 - Insérez la tubulure comme suit :
 - 1 Enfoncez le clamp vert vers le bas.
 - 2 Enfoncez la tubulure de perfusion dans l'encoche à gauche et à droite.
 - 3 Fermez la pompe en repliant le levier de la porte.
3. Suivez les indications dans la fenêtre de menu :
 - Ouvrez la pince à roulettes et confirmez par .
 - Sélectionnez le nom de la tubulure insérée par .
4. Etablissez la connexion avec le patient. Selon le dernier traitement, la pompe se lance automatiquement soit avec l'entrée du débit, soit avec la sélection d'un médicament.
5. Indiquez le débit avec .
6. Démarrez la perfusion avec .


MODIFIER LE DÉBIT

1. Pour changer le débit pendant la perfusion en cours, appuyez sur une des flèches .
2. Indiquez le nouveau débit.
3. Appuyez sur  pour continuer la perfusion avec le débit modifié.





VERROUILLER LE CLAVIER

Appuyez sur  et maintenez la touche enfoncée pendant quelques secondes. L'activation est indiquée à l'écran. Pour déverrouiller l'appareil, suivre la même procédure. Les touches  et  ne sont pas verrouillées.

CHANGER LA TUBULURE DE PERFUSION

1. Fermez la roulette de la ligne à perfusion.
2. Arrêtez la pompe avec .
3. Déconnectez le patient.
4. Ouvrez la pompe en tirant le levier de la porte vers l'avant.
5. Retirez la tubulure et en insérer une nouvelle.








RÉINITIALISER LE TRAITEMENT ET COMMENCER UN NOUVEAU TRAITEMENT








1. Arrêtez la pompe avec .
2. Appuyez sur  et sélectionnez le menu « Réinitial. thérapie » avec les flèches .
Confirmez en appuyant sur .
3. Répondez à la question par « Oui » ou « Non ».

Selon le dernier traitement, vous vous trouvez automatiquement dans la fenêtre de menu « Débit » ou dans les fenêtres de sélection d'un médicament.








ADMINISTRATION DE BOLUS

Il existe 3 possibilités différentes pour l'administration de bolus :

1. Bolus manuel :
 - Appuyez sur . L'indication « Bolus » apparaît. Appuyez à nouveau sur  et maintenez la touche enfoncée. Du liquide est administré aussi longtemps que la touche est enfoncée ou jusqu'à ce que la durée/l'administration maximale soit atteinte.
 - Le volume de bolus administré est affiché. Un signal acoustique retentit tous les 1ml de bolus administré.
 - L'administration de bolus est arrêtée lorsque la touche  est relâchée.
2. Bolus avec pré-sélection du volume :
 - Appuyez sur . L'indication « Bolus » apparaît.
 - Appuyez sur  et indiquez le volume de bolus souhaité.
 - Appuyez sur  pour lancer l'administration de bolus.
 - Avec , l'administration de bolus peut être interrompue à tout moment.

3. Bolus avec pré-sélection du volume et de la durée :
 - Appuyez sur . L'indication « Bolus » apparaît.
 - Appuyez sur  et indiquez le volume de bolus souhaité. Confirmez avec .
 - Ouvrez la fenêtre de sélection de la durée avec  et , indiquez la durée du bolus et démarrez l'administration de bolus avec .
 - Avec , l'administration de bolus peut être interrompue à tout moment.

BASE DE DONNÉES DE MÉDICAMENTS

1. Appuyez sur  et ouvrez le menu principal.
2. Naviguez jusqu'au menu « Médicament », confirmez la sélection par .
3. Si plusieurs médicaments sont enregistrés, choisissez le cas échéant le profil de patient et la station et confirmez par .
4. Choisissez la catégorie de médicament et confirmez par , choisissez le médicament/la concentration et confirmez avec .
5. Le cas échéant, lisez les informations enregistrées et confirmez avec .
6. Indiquez le débit d'alimentation et démarrez la perfusion avec .

Avant le début du traitement, l'utilisateur doit s'assurer que la base de données de médicaments enregistrée dans la pompe correspond bien au groupe cible de patients à traiter. La désignation de la base de données de médicaments est indiquée dans la pompe.