


SQ.line® KERRISON botpunches

So Qlean!


1 | Demontage



1 Sluit de voorste handgreep.

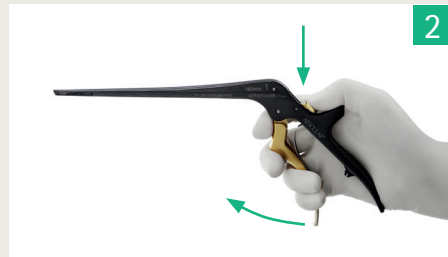

2 Druk de gouden vergrendeling volledig in en laat de handgreep los.

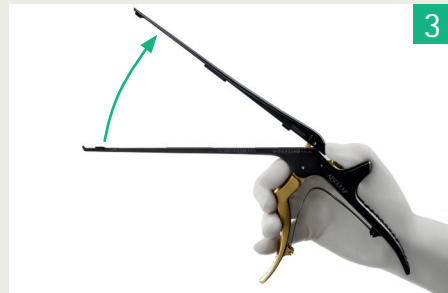


3 Open de schuifregelaar.

2 | Reiniging



Plaats de botpunches in een open positie in de lade voor reiniging.

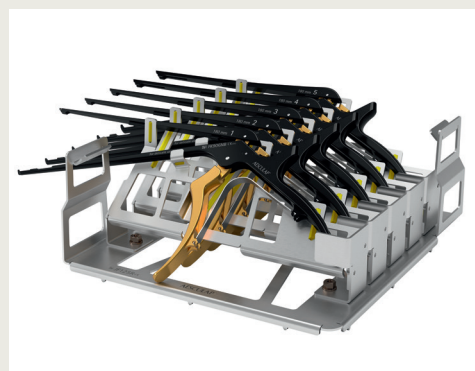

Je kan ook de botpunches in het SQ.line® KERRISON reinigingsrek plaatsen (Ref. JF125R of Ref. JF126R).

3 | Onderhoud



De bewegende delen (scharnieren, grendels en contactgebied van het schuivende deel) moeten gesmeerd worden met een steriliseerbare en vochtdoorlatende lichte machineolie zoals Sterilit® onderhoudsolie (Ref. JG598 of Ref. JG600).



4 | Montage



1 Sluit de schuifregelaar.



2 Sluit de voorste handgreep en laat hem los.



3 De gouden vergrendeling sluit vanzelf.


5 | Functie controle



Controleer of de botpunches correct werken. Neem contact op met Aesculap Technical Service voor meer informatie.

☎ Telefoon +49 7461 95-1602
✉ repair.instruments@aesculap.de

6 | Opslag

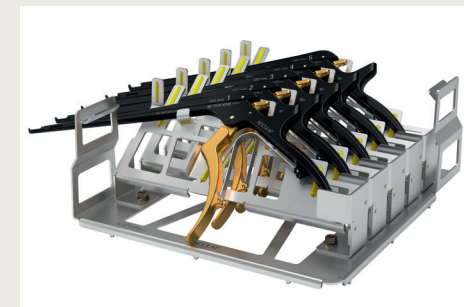

Plaats de botpunches in gesloten positie op het rek of in het SQ.line® KERRISON rek (Ref. JF125R of Ref. JF126R).

7 | Sterilisatie



Voor meer informatie raadpleeg onze brochures:

- C72902 SQ.line® KERRISON
- C84802 Goed onderhoud van instrumenten
- C63402 Aesculap InOS® – Instrumenten Organisatie Systeem Gevalideerde Reprocessing Procedure



Lees de gebruiksaanwijzing (TA018250).

<https://eifu.bbraun.com/eifu/TA018250>