

Infusomat® Space® Line

Mode d'emploi



Découvrez toutes nos lignes à perfusion



1. Fermez la roulette.



2. Percez la perfusion (filtre à air fermé).





3. Remplissez la chambre compte-gouttes (tapez sur le côté pour libérer l'air).





4. Ouvrez le clamp roulant pour amorcer la ligne à perfusion (ouvrez la prise d'air avec un flacon en verre).



5. Veuillez amorcer le manchon en silicone comme indiqué sur l'image (en le tenant à l'envers), tapez sur la tubulure pour éliminer les bulles d'air.

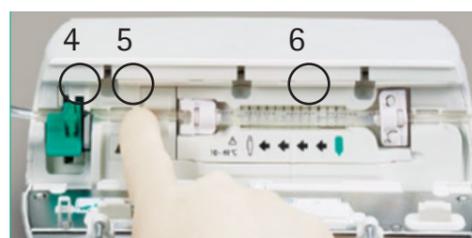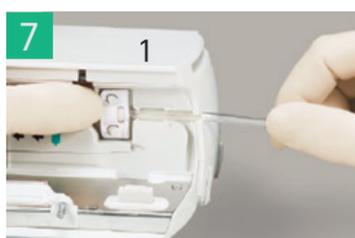

6. Placez la ligne à perfusion dans la pompe de droite à gauche (1), fixez les guides (2) et le clip de libre circulation (3).
Attention : appuyez ensuite doucement la tubulure de perfusion dans les encoches des détecteurs d'air (4), aval (5) et amont (6).

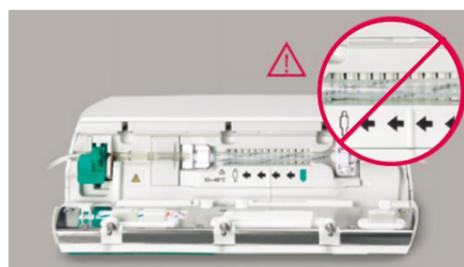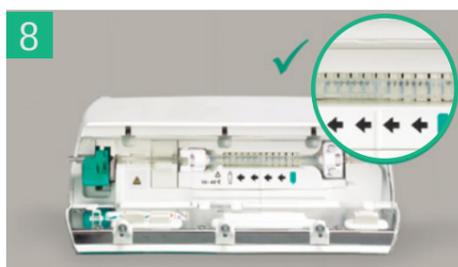

8. Vérifiez que la tubulure n'est pas tordue dans le segment de la pompe (les étoiles sont sur une ligne).