

Infusomat® Space® Line

Gebruiksaanwijzing



Ontdek al onze
infuuslijnen



1. Sluit de rolklem.



2. Prik de container aan
(luchtfILTER dicht).






3. Vul de druppelkamer (tik tegen de zij-
kant om de lucht te laten ontsnappen).





4. Open de rolklem om de infuuslijn te vullen
(open de luchtaansluiting met een glazen fles).



5. Vul de siliconen hoes zoals afgebeeld (ondersteboven houden) en tik tegen de slang
om eventuele luchtbelletjes te verwijderen.

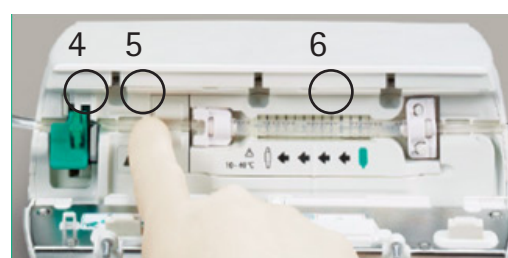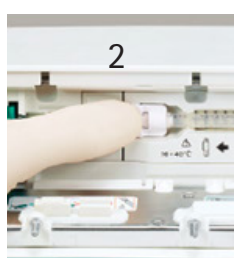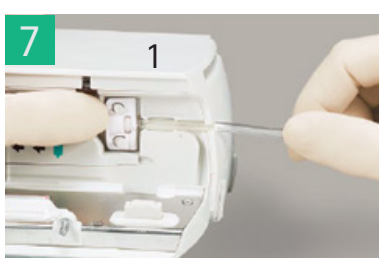

6. Leg de infuuslijn in de pomp van rechts naar links (1), bevestig de geleiders (2) en free-flow clip (3).
Let op: druk hierna de infuusslang voorzichtig in de inkepingen van de lucht- (4), down- (5) en upstream- (6) detectoren.

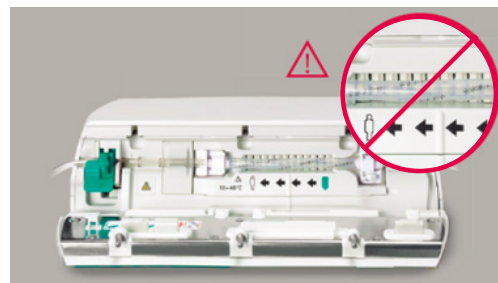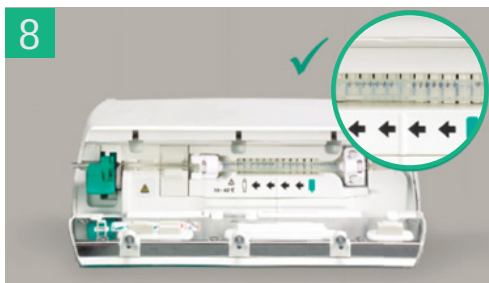

8. Controleer of de infuusslang niet gedraaid in het pompsegment is gelegd (sterretjes liggen op één lijn).