

PRÉPARATION DES KITS DE DOUBLE EXTENSION CARESITE®

MÉTHODE AVEC KIT D'ADMINISTRATION IV ET SERINGUE DE RINÇAGE PRÉREMPLIE



1 Rassemblez tout l'équipement nécessaire, tel que le kit d'extension Caresite®, le kit d'administration IV, le conteneur IV, la seringue Omniflush®, le tampon Softa® et le bac à déchets.



2 Enlevez le film protecteur du site d'injection et désinfectez si nécessaire.



3 Retirez le capuchon protecteur du perforateur.



4 Insérez le perforateur verticalement sans le tourner au moment où vous percez. L'anneau vert peut vous servir de guide.



5a Fermez le clamp à roulette et suspendez le conteneur IV au support.



5b Pressez la chambre compte-gouttes et remplissez le niveau de liquide jusqu'à l'anneau de la chambre compte-gouttes.



6 Utilisez une technique aseptique. Désinfectez les deux valves Caresite® en suivant le protocole national et/ou institutionnel.



7 Retirez le capuchon du connecteur patient/capuchon PrimeStop du kit d'administration IV.



8 Connectez le kit d'administration IV à l'une des valves Caresite®.



9 Ouvrez le clamp à roulette. Purgez la première des deux valves du kit d'extension et fermez le clamp à roulette.



10 Activez la seringue Omniflush® et connectez-la à la seconde valve Caresite®.



11 Purgez la seconde valve du kit d'extension.



12 Le processus de préparation est terminé. Retirez le bouchon protecteur du kit d'extension Caresite® et connectez le kit d'extension au cathéter IV.



13 Commencez la thérapie par perfusion.



www.safeinfusiontherapy.com