

# Softalind® ViscoRub

Gel hydroalcoolique pour  
peaux sensibles



Hygiène des mains



# Softalind® ViscoRub

## Gel hydroalcoolique pour peaux sensibles

### Caractéristiques

- Softalind® ViscoRub est un gel hydroalcoolique prêt à l'emploi pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains.
- Substances actives : éthanol(45 %) et propanol (18 %).
- Contient des agents hydratants sélectionnés.
- Sans parfum ni colorants.

### Temps d'action

- Désinfection hygiénique des mains : 30 sec.
- Désinfection chirurgicale des mains : 90 sec.

Softalind® ViscoRub	Numéro d'article	Quantité minimale de commande
100 ml flacon	19922	20 pièces/boîte
500 ml flacon avec pompe	180314	20 pièces/boîte
1000 ml flacon avec pompe	180316	10 pièces/boîte
500 ml flacon pliable	180315	20 pièces/boîte
1000 ml flacon pliable	180317	10 pièces/boîte

### Softalind® ViscoRub – ingredients

100 ml solution contains active ingredients: 45 g ethanol (100%), 18 g 1-propanol (Ph. Eur.); Other excipients: Purified water, 2-butanol, glycerin, isopropyl myristate, (cetearyl ethylhexanoate), Tetrahydroxypropyl ethylenediamine, acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, octyldodecanol, bisabolol.

### Efficace contre (tests in vitro) :

- bactéries (dont TbB, MRSA),
- levures,
- virus enveloppés (dont HBV, HCV, HIV),
- rotavirus, adénovirus, norovirus1 et poliovirus.



Bactéries/champignons	Méthode	Temps d'action
Désinfection hygiénique des mains	EN 1500	30 secondes
Désinfection chirurgicale des mains	EN 12791	90 secondes
Bactéricide	EN 13727	15 secondes
Levuricide (C.albicans)	EN 13624	15 secondes
Tuberculocide (M.terrea)	EN 14348	15 secondes

Virus enveloppés	Méthode	Temps d'action
EN (virus de la vaccine)	EN 14476	30 secondes
DVV/RKI (BVDV)	DVV <sup>2</sup> /RKI <sup>3</sup>	15 secondes
DVV/RKI (virus de la vaccine)	DVV <sup>2</sup> /RKI <sup>3</sup>	15 secondes

Virus non-enveloppés	Méthode	Temps d'action
Adénovirus	EN 14476	60 secondes
Norovirus (murin)	EN 14476	15 secondes
Poliovirus	EN 14476	60 secondes
Rotavirus	EDVV <sup>2</sup> /RKI <sup>3</sup>	15 secondes

1) MNV model virus, 2) DVV Viral Diseases & 3) RKI Robert Koch Institute for testing chemical disinfectants.

B. Braun Medical S.A. | +32 (0)2 725 96 05 | [customercare.be@bbraun.com](mailto:customercare.be@bbraun.com) | [www.bbraun.be](http://www.bbraun.be)

Les informations contenues dans cette communication sont strictement confidentielles, peuvent constituer des informations commerciales et sont destinées uniquement à l'usage du destinataire. Ces informations sont la propriété de l'expéditeur de celles-ci. L'utilisation, la divulgation ou la copie non autorisée de cette communication, en tout ou en partie, est strictement interdite et peut être illégale.

V11/2025