

MINI-GUIDE



PERFUSOR® COMPACT^{PLUS}






START EN INSTELLING VAN INFUUS

1. Druk op  om de pomp aan te zetten.
2. Volg de instructies op het display:
 - Druk de groene hendel op de pompkop naar beneden en trek hem naar rechts.
 - Trek de vergrendeling van de spuit naar je toe en draai hem naar links.
 - Leg de spuit erin, met de vleugels rechtop tussen de pomp en de voorziene clip.
 - Plaats de groene vergrendeling van de spuit en terug in zijn oorspronkelijke stand.
 - Druk de groene hendel aan de spuitarm weer naar beneden en beweeg hem tot tegen de ingelegde spuit. Zodra de druksensor de spuit voelt, sluiten de groene klemmen zich rond de spuit.
3. Selecteer het type spuit en druk op .
4. Koppel de patiënt aan en stel de therapiegegevens in.
5. Bepaal het debiet en bevestig met behulp van de pijlen .
6. Start de infusie door op  te drukken.


TOEDIENINGSSNELHEID WIJZIGEN

1. Om de toedieningssnelheid te wijzigen tijdens de therapie, druk op .
2. Stel de nieuwe toedieningssnelheid in.
3. Druk op  om het infuus opnieuw te starten met de gewijzigde toedieningssnelheid.

TOETSENVERGREDELING

De toetsenvergrendeling beschermt de pomp tegen gebruik door onbevoegden. Hou de toetsenbord  een paar seconden ingedrukt om het toetsenbord te blokkeren. Om de toetsen te deblokkeren herhaal je dit proces. De vergrendeling geldt niet voor de toetsen  en .

SPIJT VERANDEREN

1. Stop de pomp met .
2. Volg de instructies op het display:
 - Druk op de hendel op de pompkop van de spuitarm en trek hem naar rechts.
 - Trek de vergrendeling van de spuit naar je toe en draai hem naar links. Hou de spuit vast tijdens de actie.
3. Verwijder de spuit en plaats een nieuwe.








DE BEHANDELING HERSTELLEN EN EEN NIEUWE THERAPIE STARTEN

1. Stop de pomp met .
2. Druk op  en kies "Therapie opnieuw instellen" met de toetsen .
- Bevestig met .
3. Antwoord "Ja" of "Nee" op de vraag.








Indien de laatst gekozen therapie ingesteld was vanuit de medicatiebibliotheek dan kan direct een nieuwe medicatie geselecteerd worden. Indien niet, dan zal de pomp vragen om een snelheid te configureren voor de nieuwe therapie.

BOLUS TOEDIENEN

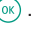


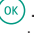



Er zijn 3 verschillende mogelijkheden om een bolus toe te dienen:

1. Handmatige bolus:
 - Druk op . Het bolusscherm wordt getoond. Druk opnieuw op  en houd deze ingedrukt. Bolus wordt toegediend zolang de knop ingedrukt is of totdat de maximum dosis/tijd is bereikt.
 - Het toegediend bolusvolume wordt getoond. Er is een auditief alarm elke keer 1ml van de bolus toegediend wordt.
 - Laat de knop  los om de bolus te stoppen.
2. Bolus met voorgeselecteerd volume:
 - Druk op . Het bolusscherm wordt weergegeven.
 - Druk op  en geef het gewenste bolusvolume in.
 - Druk op  om de bolustoediening te starten.
 - Met , kan de bolustoediening op elk gewenst moment gestopt worden.



3. Bolus met voorgeselecteerd volume en tijd:
 - Druk op . Het bolusscherm wordt getoond.
 - Druk op  en geef het gewenste bolus volume in. Bevestig met .
 - Selecteer de "Tijd" in het menu met  en . Geef de bolustijd in en start de bolustoediening met .
 - Druk op , om de bolustoediening op elk gewenst moment te stoppen.

MEDICATIEBIBLIOTHEEK GEBRUIKEN

1. Druk op  en het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer "Medicatie" in het menu en bevestig met .
3. Bij gebruik van verschillende patiëntprofielen, selecteer je eerst het gewenste profiel. Bevestig met .
4. Kies optioneel de medicatiecategorie en bevestig met . Selecteer de medicatie/concentratie en druk op  om te bevestigen.
5. Indien nodig, lees de opgeslagen informatie en bevestig met .
6. Geef de toedieningssnelheid in en start de therapie met .

Voor het begin van de behandeling, moet de gebruiker ervoor zorgen dat de geregistreerde medicatiebibliotheek in de pomp overeenkomt met de doelgroep van de te behandelen patiënten. De aanduiding van de medicatiebibliotheek wordt in de pomp weergegeven.

POMP IN PAUZE OF UIT MODUS:

Pauze modus= 3sec op de aan/uit knop duwen, met de spuit nog in de pomp.

Uit modus= 3sec op de aan/uit knop duwen, zonder disposable erin.

B. Braun Medical N.V. | +32 (0)2 712 86 50 | customercare.be@bbraun.com | www.bbraun.be

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.