

CYTO-SET® AIRSTOP– WERKWIJZE

1 SPIKE CONTAINER



Eerst wordt het hoofdinfuus klaargemaakt door het primen van de infuuslijn. Het hoofdinfuus bestaat uit een spike, 2-of 4 connecties met terugslagklep, druppelkamer met airstop, rollerklem, onderaan een bijspuitpunt met luer-connectie en primestop.

2 PRIME INFUUSLIJN



Bij het gebruik van de Cyto-Set® Infusomat Space is er een silicone segment voorzien voor in de pomp te plaatsen.

Na priming wordt de Cyto-Set® geconnecteerd aan de patient.

3 CONNECTEER DE EERSTE ZIJLEIDING



Hierna wordt de zijleiding met de cytostatica verbonden met de hoofdleiding. Er is een duidelijke klik te horen als er de connectie is gebeurd.

4 START INFUSIE



1. Sluit de klem van het hoofdinfuus
2. Open de witte klem van de zijleiding
3. De cytostatica mag volledig doorlopen tot de zijleiding volledig leeg is

5 FLUSH DE HOOFDLEIDING



1. Sluit de witte klem op de zijleiding en open de klem op het hoofdinfuus zodanig dat de leiding optimaal kan gespoeld worden.

6 CONNECTEER DE 2de ZIJLEIDING



1. Sluit de witte klem op het hoofdinfuus
2. Open de klem op de zijleiding en start met de infusie van het produkt

7 HERHAAL DE SPOELING



8



Nadat het laatste cytostatica is toegediend, dient het hoofdinfuus goed nagespoeld te worden en kan het gesloten systeem veilig gedeconnecteerd worden van de patiënt. **De set is klaar om als een gesloten systeem**