

EZCOVER® - Ultrasound probe cover set

Stop before you block!



1 Ouvrez l'emballage et sortez le set.




2 Cherchez le pli central de la housse indiqué par l'autocollant 'hand here'.



3 Placez la main dans la housse.



4a Appliquez une petite quantité de gel stérile sur la housse (a) et/ou la sonde (b).

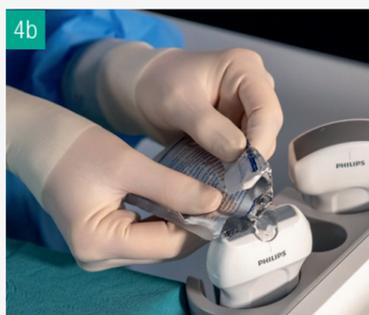

5a Prenez la sonde (a) ou demandez qu'on vous la passe (b). Remarque : "probe here" (placez la sonde ici) uniquement visible pour les variantes STOP (vérification).



6 Attrapez l'autocollant "pull here" et tirez la housse sur la sonde et le câble.



7 Utilisez les élastiques pour maintenir la housse en place.



8 Effectuez une procédure de time-out et retirez l'autocollant (uniquement variantes STOP (vérification)).



9a Veillez à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air sous la housse pour des images échographiques claires.



L'autocollant STOP (vérification) rappelle immédiatement au praticien qu'il doit s'ARRÊTER au début du traitement et effectuer la procédure de time-out. La housse EZCOVER® est disponible avec ou sans autocollant STOP.

