


Introcan® Safety 2

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Beveiligde perifere intraveneuze katheter

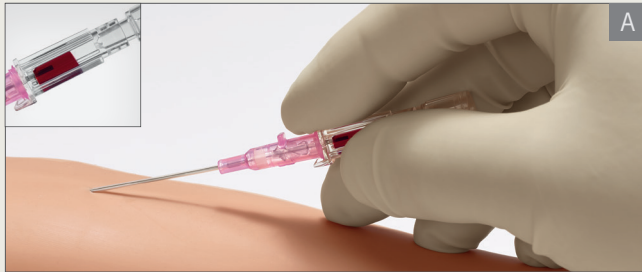


Voorbereiding

- Controleer dat alle elementen toegankelijk zijn voor het inbrengen en stabiliseren van de IVC.
- Bereid de plaats volgens het ziekenhuisprotocol voor.
- Breng een tourniquet aan.


Aanprikken & observatie

- Breng de katheter in.
- De eerste flashback van bloed bevestigt dat de katheternaald in de vene zit.

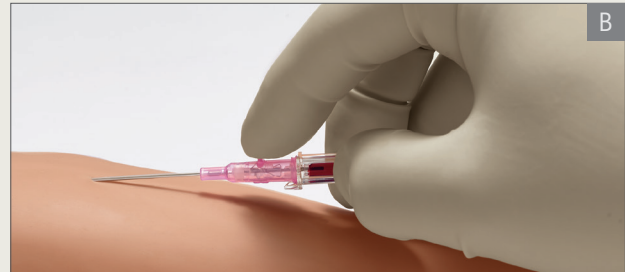


Controle

- Laat de katheter zakken.
- Schuif de katheter op zijn plaats met behulp van de afdruwplaat.

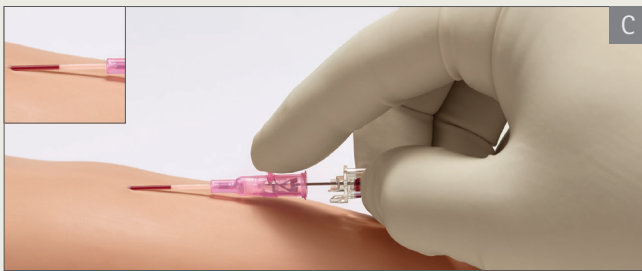

Bevestiging

- Een tweede flashback van bloed is zichtbaar wanneer de katheter in de vene wordt geschoven.
- Trek de naald in een gecontroleerde en continue beweging terug.

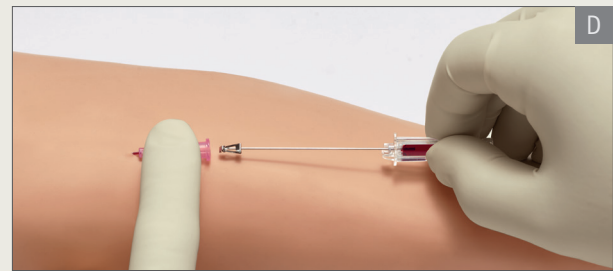


Veiligheid

- Stabiliseer de katheter.
- De naaldtip wordt passief beveiligd door de veiligheidsclip.
- Geen bloedlekage dankzij het septum (bloedcontrole).
- Dubbele veiligheid voor de gebruiker dankzij Introcan® Safety 2.



Stabilisatie

- Bedek het aanprikpunt met een transparant steriel verband.
- Sluit de katheter aan op de infuuslijn of IV-accessoire.

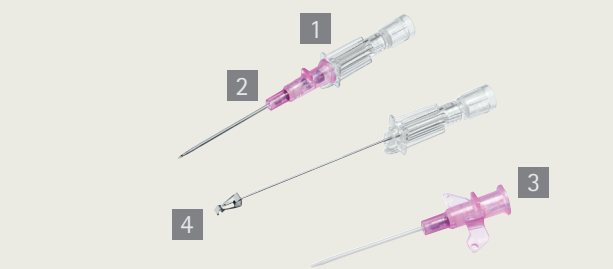

Componenten

- 1 | Flashbackkamer
- 3 | Katheterkamer

- 2 | Afdruwplaat
- 4 | Veiligheidsclip

Opgelet: Buig de katheter en/of naald niet bij het inbrengen, verplaatsen of terugtrekken van de naald. Steek de naald nooit opnieuw in de katheter, want de katheter kan afschuiven en een embolie veroorzaken. Let op dat de katheternaaf niet wordt geopend zonder dat deze op een accessoire is aangesloten. Raadpleeg de bijsluiter voor volledige instructies.

Productinformatie

Introcan Safety® 2	Gauge (G)	Katheterlengte		Katheter ø (mm)	Flowrate (ml/min)	Flowrate (ml/uur)	Katheter-materiaal	Artikelnummer (referentie)	
		(mm)	(inch)					zonder vleugels	met vleugels
	24	14	5/8	0.7	25	1560	PUR	4242000-01	4242001-01
	24	19	3/4	0.7	22	1320		4242002-01	4242003-01
	22	25	1	0.9	35	2100		4242004-01	4242005-01
	20	25	1	1.1	65	3900		4242006-01	4242007-01
	20	32	1 1/4	1.1	60	3600		4242008-01	4242009-01
	20	50	2	1.1	55	3300		4242010-01	4242011-01
	18	32	1 1/4	1.3	103	6300		4242012-01	4242013-01
	18	45	1 3/4	1.3	90	5900		4242014-01	4242015-01

Verkoopenheden: 200 stuks (4 dozen x 50 stuks).

Bevat geen DEHP, latex/natuurlijk rubber, PVC.

Referenties

1. Tosini W, Ciotti C, Goyer F, Lolom I, L'Heriteau F, Abiteboul D, et al. Needlestick Injury Rates According to Different Types of Safety-Engineered Devices: Results of a French Multicenter Study. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2010 Apr;31(4):402-7
2. Toshiyasu Suzuki; Haruo Fukuyama; Junichi Nishiyama; Masatoshi Oda; Miwa Takahashi (2004): Comparison of Penetration Force and Catheter Tip Damage of Intravenous Catheters among Different Catheter Tip Designs. In: *Circulation Control* 24 (1), S. 39-45
3. MTC - Engineering Test Report - IS2 septum by Dr. Brünke (2019)



Milieuvriendelijk drukwerk

B. Braun Medical N.V. | BE-1831 Diegem | België | www.bbraun.be

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.

V07/2025