



Discofix[®] C

Aanbevelingen voor het gebruik van de medicatiebestendige driewegkraan


Discofix[®] C met draaibare adapter en klik bij iedere draaibeweging van 45°, biedt tal van voordelen. Volg de onderstaande richtlijnen en profiteer er maximaal van

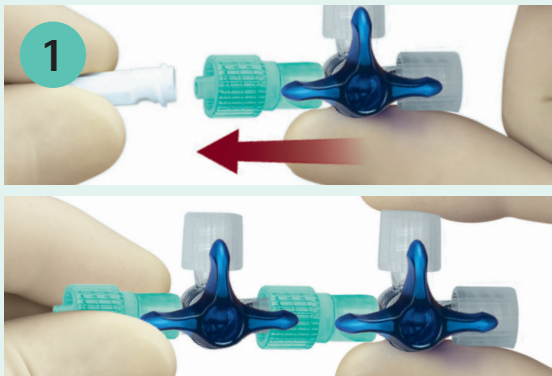

Sluit de Discofix[®] C aan.

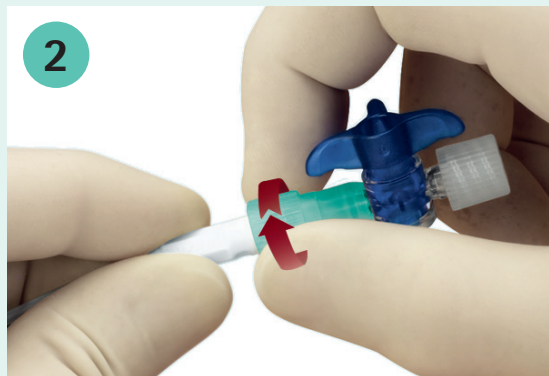


Draai hem stevig vast.

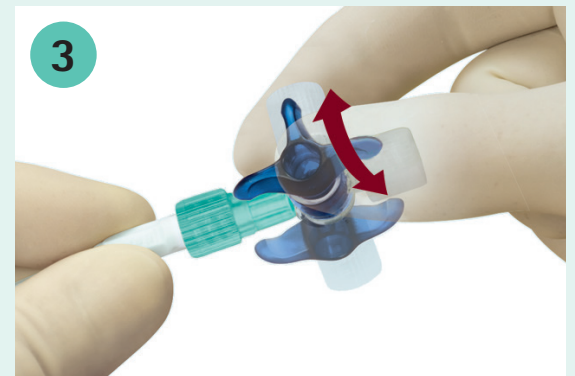

Zodra hij op zijn plaats zit, draait de kraan 360° om zijn eigen as. De gewenste positie kan gemakkelijk worden aangepast zonder risico dat het systeem onbedoeld wordt losgekoppeld.



Injecteren en aspireren kan eenvoudig door de adapter te draaien.

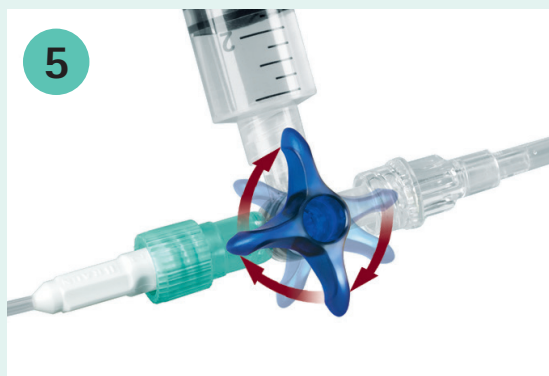

De voelbare klik bij iedere draaibeweging van 45° zorgt ervoor dat de positie van de driewegkraan precies en eenvoudig kan worden aangepast.

De draaibare adapter van de Discofix[®] C en de klik bij iedere draaibeweging van 45° zijn bijzonder handig, zeker bij mobiele patiënten.

- De draaibare adapter beperkt het risico op onbedoelde loskoppeling van het systeem door bewegingen van de patiënt.
- De voelbare klik bij iedere draaibeweging van 45° bevestigt de juiste positie van de kraan. Tevens verhoogt dit de veiligheid tijdens het gebruik van de driewegkraan.



Veiligheidsfuncties

- Injecteren en aspireren kan eenvoudig door de adapter te draaien
- De juiste positie van de kraan wordt bevestigd door de voelbare klik bij iedere draaibeweging van 45°
- Het systeem is bestand tegen de gevaarlijke effecten van farmaceutische middelen
- Ook tijdens langdurige toediening lekt de verbinding niet
- Het systeem voorkomt lekken, contaminatie en luchtembolieën